



NOTICE D'UTILISATION

SIEGE COQUILLE INNOV'SA

Fauteuils coquille destinés au maintien postural des personnes dépendantes nécessitant l'aide d'un accompagnant



**PREMIUM ESPRIT
BIEN-ETRE**



**ESPRIT
BIEN-ETRE**



STARLEV



MONTMARTRE



**ELYSEE
(chassis roulant)**



**VENDÔME
AUTOMATIQUE**



OPTIMAL

Améliorons ensemble le service rendu au patient !

A PROPOS...

Nous vous remercions d'avoir choisi un siège coquille INNOV'SA.

Notre gamme de fauteuil est étudiée pour répondre aux besoins de chacun en matière d'adaptation morphologique (15 tailles de coques), de base roulante pour convenir aux différents milieux d'usage et également de plusieurs modèles de repose-jambes (manuel et automatique) pour un grand confort. Une gamme d'accessoires complète nos sièges : tablettes adaptables, cales-troncs, cales-tête et autres accessoires même personnalisés à la demande pour votre plus grand confort. Votre distributeur vous aura préalablement conseillé le produit adapté et les précautions de bon emploi et bon usage dans votre environnement. Une démonstration est toujours vivement recommandée.

FICHE D'IDENTIFICATION (à remplir à la livraison)

Siège coquille modèle :

Taille :

Couleur :

Accessoires :

Nom de l'utilisateur :

Prénom :

Age :

Poids :

Taille :

Largeur de bassin :

N° série du siège :

Délivré le :

Cachet du distributeur

Garantie 2 ans sur tous les modèles

PRECONISATIONS ET RECOMMANDATIONS

A la livraison de votre siège, une explication complète des fonctionnalités du modèle choisi vous sera donnée. Si vous n'avez pas tout gardé en mémoire, n'hésitez pas à joindre votre distributeur pour des explications complémentaires. Il est indispensable de connaître les fonctionnalités et les règles de sécurité de base : le déplacement et le freinage, l'inclinaison, les positions et règles pour les transferts, le bon usage des sangles. **Pour tous les réglages, les transferts, la sécurité d'usage et le bien être, l'aide et la vigilance sont impérative de la part de l'accompagnant ou tierce personne**

- Le choix de la bonne taille de siège est impératif, une fiche de prise de mesure disponible chez votre distributeur lui aura permis de vous fournir la taille de coque adaptée à votre morphologie (15 tailles de coques).

- Si le siège fourni ne convient pas à votre morphologie (par ex : trop étroit ou trop large ...), faites-le lui savoir afin d'effectuer un changement. En effet, trop étroit, il sera inconfortable et pourra occasionner des appuis (points durs) et peut-être des risques d'escarres. En revanche une taille de coque trop large diminue le maintien, ainsi que le bon positionnement et l'usage des sangles pourrait provoquer des effets néfastes.

⚠ L'usage de la sangle ventrale est destiné au maintien postural des patients à faible tonus postural.



Option : le harnais d'épaules s'attache sur la ceinture ventrale.

- Le jeu de sangles fourni avec chaque siège comprend une ceinture ventrale. Chacune des sangles est réglable et amovible. L'usage de celles-ci permet d'obtenir un meilleur positionnement dans le cas d'une faiblesse musculaire entraînant un défaut de posture, et permet également un complément de sécurité contre la chute (ex : l'utilisateur s'endort et penche vers l'avant).

Pour la mise en place de la ceinture ventrale au fauteuil :

- Placez et fixez la ceinture abdominale de sorte que le patient soit assis au fond de son siège, la zone lombaire contre le dossier du fauteuil.
- Ajuster le serrage afin d'éviter que l'utilisateur puisse passer par-dessous et se blesser.

⚠ RECOMMANDATIONS POUR EVITER LES RISQUES POSSIBLES LIES A L'UTILISATION

La ceinture ventrale doit être bouclée. Le réglage et la vigilance d'une tierce personne sont impératifs. Celle-ci étant amovible, il est important à chaque utilisation de s'assurer qu'elle est correctement ancrée sur ses fixations (en tirant dessus par ex.).

Option : le harnais d'épaules qui s'attache avec la ceinture ventrale.

En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Les recommandations du médecin traitant quant à l'usage adapté ou non du siège sont également impératives.

En aucun cas, ce jeu de sangles ne peut être considéré comme un dispositif de contention et à cet effet, le verrouillage et déverrouillage des boucles de sangles est toujours accessible par l'utilisateur.

- L'assise de nos sièges est amovible. Veillez à ce qu'elle soit toujours correctement inscrite dans son emplacement, surtout si celle-ci a été manipulée lors d'un entretien ou d'un nettoyage ou même suite à un transfert difficile.

Il est formellement déconseillé d'utiliser le siège sans son coussin d'assise adapté et de remplacer celui-ci par un autre coussin. Si vous souhaitez, en complément de votre coussin anti escarres, recevoir le coussin d'assise d'origine, veuillez SVP contacter notre service commercial.

- La mise en place et mise en fonction des différents accessoires livrés avec le siège coquille doivent être prises en charge par l'accompagnant pour les bons réglages et le bon respect de ceux-ci. Dans le doute, consultez votre distributeur qui saura vous conseiller.
- Les transferts sans l'assistance impérative d'un aidant présentent un risque de chutes
- Les changements d'inclinaison sans l'assistance impérative d'un aidant présentent un risque de chutes

- L'usage du siège et de ses accessoires par une personne agitée ou désorientée présente des risques multiples sans la surveillance et la vigilance à tout instant d'un aidant à la fois pour le bon positionnement (la bonne posture) du patient mais aussi pour la mise en place ou pour ôter des sangles, s'incliner, aider au transfert.
- Veiller aux obstacles environnant lors de ces manœuvres
- La surveillance de l'environnement de l'utilisateur pendant une inclinaison ou un transfert par l'aidant est impérative pour ne pas risquer un pincement de main sous la coque dans la partie mécanique mobile activée par le vérin électrique ou tout autre risque de pincement ou d'écrasement faute de vigilance d'un aidant.

- Le repose-pieds doit être réglé au contact du sol (sauf pour le Vendôme AUTOMATIQUE, ETOILE, PREMIUM et STARLEV') quand le siège est incliné vers l'avant afin de favoriser le transfert en toute sécurité et éviter ainsi une bascule avant du fauteuil. Idem pour l'accès au siège : les roues doivent être freinées et le repose-pieds plaqué au sol permettant à l'utilisateur de marcher dessus ce qui stabilise encore plus le siège lorsqu'il devra s'asseoir ensuite.

- L'usage du siège sans son repose-pieds est fortement déconseillé
(sauf Vendôme AUTOMATIQUE, ETOILE, PREMIUM et STARLEV')

En dehors des déplacements du siège, le dispositif de freinage des roues devra être actionné. Lors des déplacements, veillez à disposer de l'espace nécessaire pour la circulation du siège en toute sécurité. Le passage des portes, les barres de seuil ou niveau d'ascenseur etc ... doivent être pris en considération pour ne pas blesser l'utilisateur ou même abîmer le siège. Seuls les châssis roulants sont destinés à un usage extérieur.

- **L'usage du repose-jambes relevable par crémaillère doit être actionné par l'accompagnant** (concerne les sièges Montmartre et Elysée). Le réglage de la hauteur doit tenir compte du bien-être de l'utilisateur et également de sa capacité à conserver ses jambes bien au centre du repose-jambes. Dans le cas contraire, consultez votre distributeur afin de trouver une solution alternative. La vigilance de la tierce personne est impérative.
- **Pour une hygiène plus exigeante** nous vous proposons d'orienter votre choix sur les modèles en similicuir/jersey (type Montmartre, Elysée...), bien plus facile à nettoyer de par leurs revêtements contrairement à un modèle en microfibre sur support imperméable.

DETAIL ET CARACTERISTIQUES PRODUIT (Sièges montés standards sans accessoire)

Poids	De 34 à 46 kg selon modèle
Longueur totale	De 100 à 110 cm selon modèle
Longueur inclinée	De 145 à 157 cm selon modèle
Largeur	De 65 à 77 cm selon taille
Hauteur totale	De 125 à 130 cm selon réglage

Hauteur sol accoudoir	62 cm – 64,5 cm – 67 cm – Elysee 65 cm
Hauteur sol assise	42 cm – 44,5 cm - 47 cm – Elysee 45 cm
Profondeur assise	≈ 50 cm
Poids maximum accepté	130 kg
Inclinaison	≈ 28 °
Couleur Châssis	Gris RAL 7001 (Epoxy) ou Marron RAL MARS
Revêtement	Skai Bleu Framboise et « TISCARE » Gris Microfibre Chocolat PREMIUM & STARLEV' : CHOCO , CHIC et BLACK Edition

FREINS

Les sièges coquille moulés

OPTIMAL, MONTMARTRE, VENDÔME AUTOMATIQUE, ETOILE, PREMIUM et STARLEV' sont équipés de 4 roues sont équipés de 5 roues dont au moins 4 extérieures à freins

Engagement du frein au pied. Poussez la patte 1 vers le bas



Désengagement du frein au pied. Repoussez la patte 1 vers le haut

Opération à effectuer sur les 4 roues

Les modèles

Vendôme AUTOMATIQUE, ETOILE, PREMIUM et STARLEV' sont fournis avec quatre cache roues offerts.

Il est impératif de retirer les quatre cache roues avant de déplacer le fauteuil.

Les châssis roulants **ELYSEE**



Appuyez au pied vers le bas pour engager le frein. Faites le mouvement inverse (relevez) pour désengager le frein.

L'ETOILE, le PREMIUM et le STARLEV' ont un pied équipé de vérin électrique. L'ensemble Vérin (aux normes NF Médical) comprend un vérin (garantie 5 ans), une alimentation 24V, une télécommande, un câble secteur.

Le vérin est fixé au siège par goupilles que l'on peut ôter sans outils (débrayage rapide en cas de panne électrique ou autres).

En cas de dysfonctionnement du vérin électrique, veuillez débrancher le câble du secteur et appeler votre distributeur

INCLINAISON ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Tous les sièges sont équipés d'un dispositif d'inclinaison de la coque. Pour incliner le siège, veuillez actionner la poignée située en haut de la barre de poussée au dos du siège. **Cette opération doit être effectuée exclusivement par l'accompagnant.**



Pour le modèle Vendôme AUTOMATIQUE, le patient peut s'incliner seul.

Pousser la main courante pour s'allonger et tirer la main courante pour se relever.

Les modèles ETOILE, PREMIUM et STARLEV' s'inclinent en actionnant la télécommande du vérin électrique.


Tous nos fauteuils électriques disposent de la fonction STOP & START. Le fauteuil s'arrête automatiquement lorsque l'assise est parallèle au sol.

Pour le modèle STARLEV' enlever le doigt du bouton puis rappuyer afin que le fauteuil se relève.



Inclinaison arrière du fauteuil

Inclinaison avant du fauteuil

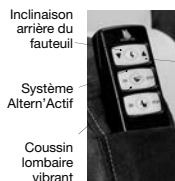

Inclinaison arrière du fauteuil

Système Altern'Actif


Coussin lombaire vibrant

Remise à l'avant du fauteuil

TABLETTES ADDITIONNELLES

2 modèles de tablette sont disponibles en option sur le MONTMARTRE et l'ELYSEE.

- ① La tablette ventrale
- ② La tablette à rangement vertical

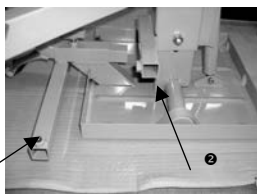

- ① Emplacement pour la Tablette Ventrale
- ② Emplacement pour la Tablette Rangement Vertical



Chacune des tablettes ci-dessus est escamotable, ajustable et amovible. Lors de l'installation du siège, votre distributeur vous formera sur son utilisation.

REPOSE-JAMBES et REPOSES-PIEDS

Tous nos sièges sont munis d'un repose-jambes (appui-mollets) articulé ou non selon les modèles.

Tous nos sièges (sauf le Vendôme AUTOMATIQUE, l'ETOILE, le PREMIUM et STARLEV') sont équipés d'un repose-pieds réglable en hauteur à l'aide d'une molette de serrage. Son usage est impératif pour les transferts ou les déplacements en position non inclinée.

Le repose-pieds doit être en contact à plat avec le sol.

MODÈLE OPTIMAL

Repose-jambes non articulé (fixe) avec réglage en profondeur grâce à une molette située sous l'assise.



MODÈLES VENDÔME AUTOMATIQUE, ETOILE, PREMIUM et STARLEV'

Le repose-pieds mollets se relève automatiquement lors de l'inclinaison et reprend sa position initiale pour faciliter le transfert.



MODÈLES CHASSIS ROULANT ELYSEE, MONTMARTRE

Le repose-jambes se relève indépendamment de l'inclinaison du siège grâce à une crémaillère à 6 positions. L'usage du repose-jambes doit être actionné par l'accompagnant.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin de conserver un parfait état visuel et fonctionnel de votre siège, un entretien régulier est impératif.

Nous vous conseillons de faire réviser l'état de votre siège une fois par an auprès de votre distributeur et de garder ci-dessous la trace de votre révision.

Révisé le :

Cachet et Signature

Révisé le :

Cachet et Signature

Révisé le :

Cachet et Signature

Révisé le :

Cachet et Signature

Révisé le :

Cachet et Signature

Pour la maintenance du piétement et de son revêtement epoxy, une brosse, une éponge, de l'eau tiède et un chiffon sec vous permettront de maintenir un bon état visuel de votre fauteuil.

Sur les pièces mobiles, du lubrifiant permettra d'entretenir le mouvement sans risque de friction désagréable.

La housse du siège peut être entretenue et nettoyée à l'aide d'un chiffon imprégné d'eau chaude (aucun solvant). Prenez conseil auprès de votre distributeur.

***INNOV'SA décline toute responsabilité des conséquences
d'un manque de maintenance et d'entretien.***